

Nadja!

Prüfprotokoll Überwachungsmonitor

gem. § 11 MPBetreibV

QMS-Medizintechnik • Siemensweg 3 • 59519 Möhnesee • Tel. 02924/324747 • Fax 02924/324748

Betreiber	Standort
Privatklinik Schloßstraße	Berlin

Gerät	Hersteller	Seriennummer	ID-Nummer
M-NE-STPR	Dortex-Ohmada	785340	

	vorhanden	nicht vorhanden	entfällt
Gerätebuch	lt. Betreiber ☒		
Gebrauchsanweisung	lt. Betreiber ☒		
Zubehör		☒	

Sichtprüfung	i.O.	nicht i.O.	entf.	Bemerkung
Beschriftung / Bedienungselemente	☒			
Gehäuse / Leitungen	☒			
Potentialausgleich / Sicherungen			☒	

Elektrische Sicherheit nach EN 62353; VDE 0751-1:2008-08				Prüfgerät: SECUTEST SIII	
Ersatzgeräteableitstrom	0,200 mA	Schutzleiterprüfung	☒ Ω	Isolation	>310 MΩ
Ersatzpatientenableitstrom	0,009 mA	Differenzstrom	☒ mA		

Funktionskontrolle / Sicherheitseinrichtung	i.O.	nicht i.O.	entf.	Bemerkung
Netzbetrieb / Akkubetrieb / Batteriebetrieb / Alarmer	☒			
EKG, SpO ₂ , IBP	☒			
O ₂ / CO ₂ -Messung			☒	
Narkosemittelmessung			☒	
Volumenmessung / Druckmessung			☒	
NIBP / MTK	☒			MTU 2024
Temp. / MTK	☒			MTU 2024 T1/T2
Gaskalibration / Flowkalibration			☒	

Prüfergebnis	Bemerkung	
© mängelfrei	☒	Gepüft mit eigenem Monitor
© mit Mängeln		S15 Compact SN: 6255744 und
© mit sicherheitsrelevanten Mängeln		Zubehör

Nächste sicherheitstechnische Kontrolle	11/2023
---	---------

Datum und Unterschrift Prüfer

28.11.2022 Rentz

MTK-Prüfprotokoll für Medizinprodukte zur nichtinvasiven Blutdruckmessung (Monitoring) gem. § 14 MPBetreibV

QMS-Medizintechnik • Siemensweg 3 • 59519 Möhnesee • Tel. 02924/324747 • Fax 02924/324748

Betreiber <i>Privatklinik Schloßstraße</i>	Standort <i>Berlin</i>
--	----------------------------------

Gerät <i>M-NESTPR</i>	Hersteller <i>Datex-Ohmeda</i>	Seriennummer <i>785340</i>	ID-Nummer
---------------------------------	--	--------------------------------------	------------------

Prüfmittel:	<i>DPI 705 von Druck Limited</i>	Prüfer: <i>Deppner Reuth</i>
--------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Messverfahren und Beurteilung nach:	
☒	Leitfaden zu messtechnischen Kontrolle (LMK)
☐	Anlage 15 oder 23 zur Eichordnung
☐	Sonstiges

Arbeitsschritt		I.O.	n.I.O.	Entf.
1.	Pneumatikkreis	☒	☐	☐
2.	Anzeige	☒	☐	☐
3.	Kennzeichnung	☒	☐	☐
4.	Plausibilitätsprüfung	☒	☐	☐

Messgenauigkeit		Sollwert	Meßwert	Toleranz	I.O.	n.I.O.	Entf.
5.	Luftdichtigkeitsprüfung (mmHg/min)	0	<i>0</i>	6mmHg/min	☒	☐	☐
6.	Messgenauigkeit 1 (mmHg)	0	<i>0</i>		☒	☐	☐
7.	Messgenauigkeit 2 (mmHg)	50	<i>50</i>		☒	☐	☐
8.	Messgenauigkeit 3 (mmHg)	100	<i>100</i>		☒	☐	☐
9.	Messgenauigkeit 4 (mmHg)	150	<i>150</i>		☒	☐	☐
10.	Messgenauigkeit 5 (mmHg)	200	<i>200</i>		☒	☐	☐
11.	Messgenauigkeit 6 (mmHg)	250	<i>250</i>		☒	☐	☐
12.	Messgenauigkeit 7 (mmHg)	300	<i>300</i>		☒	☐	☐
13.	Überdrucksicherung (mmHg)		<i>306</i>		☒	☐	☐

Prüfergebnis	
☒	Messtechnische Kontrolle bestanden
☐	Messtechnische Kontrolle nicht bestanden

Bemerkung

Geräte, die die Fehlergrenzen nicht einhalten, dürfen nicht betrieben werden, siehe MPBetreibV §2 (6). Die Ergebnisse der messtechnischen Kontrolle sind in das Medizinproduktebuch einzutragen, siehe MPBetreibV §11 (7)

28.11.2022 Reuth
Datum und Unterschrift Prüfer

2024
Nächste MTK

MTK-Prüfprotokoll für Medizinprodukte zur Temperaturmessung (Monitoring)

gem. § 14 MPBetreibV

QMS-Medizintechnik • Siemensweg 3 • 59519 Möhnesee • Tel. 02924/324747 • Fax 02924/324748

Betreiber	Standort
Privatklinik Schloßstraße	Berlin

Gerät	Hersteller	Seriennummer	ID-Nummer
M-NESTPR	Dantex-Alameda	785340	

Prüfmittel:	WMG-4 von H&H Gerätetechnik	Prüfer: Deppner <i>Rent</i>
-------------	-----------------------------	-----------------------------

Messverfahren und Beurteilung nach:							
☒	Leitfaden zu messtechnischen Kontrolle (LMK)						
☐	Anlage 15 oder 23 zur Eichordnung						
☐	Sonstiges						
Arbeitsschritt					I.O.	n.I.O.	Entf.
1.	Anzeige				☒	☐	☐
2.	Kennzeichnung				☒	☐	☐
3.	Fehler Kurzschluss				☒	☐	☐
4.	Fehler Fühlerbruch				☒	☐	☐
5.	Ziffern Schrittprüfung				☒	☐	☐
Messgenauigkeit Kanal 1					Sollwert	Meßwert	Toleranz
6.	Messpunkt 1	32 °C	32,0 °C	0,1	☒	☐	☐
7.	Messpunkt 2	35 °C	35,0 °C	0,1	☒	☐	☐
8.	Messpunkt 3	37 °C	37,0 °C	0,1	☒	☐	☐
9.	Messpunkt 4	39 °C	39,0 °C	0,1	☒	☐	☐
10.	Messpunkt 5	42 °C	42,0 °C	0,1	☒	☐	☐
Messgenauigkeit Kanal 2					Sollwert	Meßwert	Toleranz
11.	Messpunkt 1	32 °C	32,0 °C	0,1	☒	☐	☐
12.	Messpunkt 2	35 °C	35,0 °C	0,1	☒	☐	☐
13.	Messpunkt 3	37 °C	37,0 °C	0,1	☒	☐	☐
14.	Messpunkt 4	39 °C	39,0 °C	0,1	☒	☐	☐
15.	Messpunkt 5	42 °C	42,0 °C	0,1	☒	☐	☐
Prüfergebnis							
☒	Messtechnische Kontrolle bestanden						
☐	Messtechnische Kontrolle nicht bestanden						
Bemerkung							
Geräte, die die Fehlergrenzen nicht einhalten, dürfen nicht betrieben werden, siehe MPBetreibV §2 (6). Die Ergebnisse der messtechnischen Kontrolle sind in das Medizinproduktebuch einzutragen, siehe MPBetreibV §11 (7)							

28.11.2022 *Rent*
Datum und Unterschrift Prüfer

2024
Nächste MTK

